

Für die tägliche Nasenhygiene

Das hypertonische Spray zur Nasenspülung reinigt Ihre Nase auf sanfte Weise. Natürliches Meerwasser erleichtert den Abtransport von Schleim, damit Sie wieder frei atmen können. Die regelmäßige Reinigung der Nase kann dazu beitragen, Atemwegsinfektionen, wie Erkältungen und Allergien, zu verhindern.

Anwendung:

Für die Nasenhygiene.

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Ohne Konservierungsstoffe.

Ohne Aromastoffe.

Gebrauchsanweisung:

1. Drücken Sie vor der ersten Anwendung kurz auf den Sprühkopf, um den Applikator zu aktivieren
2. Neigen Sie den Kopf zur Seite und halten Sie das Ende des Sprühkopfs in das Nasenloch
3. Drücken Sie kurz (1 – 2 Sekunden) auf den Sprühkopf
4. Fangen Sie die herauslaufende Lösung auf und putzen Sie anschließend Ihre Nase
5. Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch
6. Reinigen Sie den Sprühkopf nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser 2-6 Mal täglich in jedem Nasenloch anwenden.

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Wick VapoSpray mit Meerwasser sind keine Gegenanzeigen bekannt. Wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel in der Nase anwenden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

WICK VapoSpray mit Meerwasser ist ein Spray zur Nasenspülung, das aus einer hypertonischen Meerwasser-Lösung besteht:

Gefiltertes Meerwasser 80 Gew.-%

Gereinigtes Wasser 20 Gew.-%

Ingredients:

WICK VapoSpray ist ein medizinisches Produkt. Isotonische Salzlösung mit natürlichem Meerwasser 0,9% Salz.