



Nasal Spa® Nasenspray - Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,
Vielen Dank dass Sie sich für unser Nacur® Nasenspray, ein isotonisches Nasenspray mit natürlichem Meersalz entschieden haben.

Gesunde Nasenpflege

Unsere Nase ist unser Luftfilter für unseren Körper und schützt zusammen mit unserem Nasenschleimhautreinigungssystem gegen Infektionen der Atemwege.

Schleim und die Zilia (Haare in der Nase) fangen Staub, Pollen, Bakterien und andere Schmutzstoffe ab und verhindern das Eindringen in unseren Körper.

Wenn dieses System beeinträchtigt ist, z.B. aufgrund trockener Nase oder Verstopfung, kann es zu Krankheiten wie Bronchitis, Heuschnupfen oder Stirnhöhlenentzündungen kommen.

Was macht das Nasal Spa® Nasenspray?

Das Nasal Spa® Nasenspray reinigt, befeuchtet und hält Ihre Nase und Nasenschleimhaut in einer gesunden Balance und Zustand.

Wie funktioniert das Nasal Spa® Nasenspray ?

Das Nasal Spa® Nasenspray verdünnt Nasenschleim und befeuchtet ausgetrocknete Nasengänge, was somit das Nasenschleimhautreinigungssystem stimuliert.

Der alkalische pH-Wert löst Schleim schnell auf und unterstützt optimale Nasen- und Stirnhöhlenventilation.

Benutzen Sie Ihr Nasal Spa® Nasenspray täglich um Ihre Nase zu säubern und wieder frei durch die Nase atmen zu können.

Wer kann Nasal Spa® Nasenspray benutzen?

Es ist geeignet für Babies, Kinder und Erwachsene.

Es kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit benutzt werden.

Das Nasal Spa® Nasenspray ist ideal für Sportler, Maurer, Chemikalien- und Holzarbeiter, Frisöre, Büroangestellte, Taucher, auf Luftreisen und für heisses & trockenes Klima.

Wann kann ich das Nasal Spa® Nasenspray benutzen?

Es kann benutzt werden, bei:

- verstopfter und trockener Nase
- juckender oder triefender Nase
- allergischer Reaktion zu Pollen, Staub, Staubmilben, usw.
- exzessiver Schleimproduktion
- 'Tropfengefühl' im Nasenrachen
- nach Nasenoperationen

Kann ich das Nasal Spa® Nasenspray mit meinen Medikamenten benutzen?

Das Nasal Spa® Nasenspray ist arzneimittel-frei und kann daher mit anderen Medikamenten wie Anti-histaminen oder Steroidnasensprays benutzt werden.



Benutzen Sie Nasal Spa® Nasenspray vor Anwendung eines Antihistamines oder eines Nasensteroidsprays, um deren Effektivität zu steigern.

Dosierung

Einen oder mehrere Sprühstöße per Nasenloch, so oft wie nötig.

Anleitung

Vor der ersten Benutzung, bitte das Spray ein paar mal pumpen und dann die Düse in ein Nasenloch halten. Sprühen Sie einige Sprühstöße hinein, dabei die Flasche aufrecht halten, und dann durch die Nase einatmen.

Wiederholen Sie dies mit dem anderen Nasenloch.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Aufbewahrungshinweise:

Unter 25°C lagern (77°F).

Ausser Reichweite von Kindern halten.

Nicht nach dem Verfallsdatum benutzen.

Nicht mit anderen Benutzern teilen.

Diese Flasche kann bis zu 6 Monaten nach Anbruch benutzt werden.

Zusammensetzung

10.5mg/ml Natürliches Meersalz, gereinigtes Wasser.

Flaschengrösse 20ml.

Jeder Sprühstoss liefert 140mg.

Ohne Konservierungsmittel und Zusatzstoffe.